

The smarter **InZone® Detachment System***

Improved user experience in detaching

Target®

Detachable Coils



Shortest junction on the market

이전과 동일한 전해 분해 방식이며, 가장 짧은 junction을 갖고 있어 시술 시 kickback을 최소화하여 부드럽게 코일을 전달할 수 있습니다.

The only detachment device that is designed to:

- Interactive 기술 정보를 제공합니다.
- Cycle 완료 시, 코일의 detachment 가 잘 되었는지 확인합니다.

Detachment를 완료한 뒤, fluoroscopy를 통해 delivery wire를 약간 당겨서 Coil 이 확실히 detachment되었는지 확인하십시오. 그리고 영상 이미지를 통해 coil mass 가 움직이지 않는지 확인하십시오.

Designed for: Higher detachment rate

InZone시스템은 detachment상태 확인이 가능하며, 한번의 시도로 detachment가 잘 되도록 전류의 양을 적절하게 조절합니다.

Improved signal accuracy

더욱 smart해진 InZone은 이전보다 정확하게 detachment의 상태를 확인해서 알려줍니다.

User-friendly signal

이전과 같은 신호 시스템이며, 더욱 더 사용자 친화적인 소리를 가집니다.



stryker
neurovascular

How to Use

Detachment preparation

InZone의 funnel을 코일의 delivery wire 끝단에 맞춘 뒤, delivery wire가 완전히 들어가도록 끝까지 밀어 넣어 줍니다.



Detachment activation

시스템 준비 표시에 녹색 불빛이 나오면, 버튼을 한번 눌러 detachment 시스템을 작동합니다.

전류가 흐르는 동안, 전류 흐름 표시에 녹색 불빛이 들어옵니다.



Detachment cycle complete

InZone의 detachment cycle이 완료되었다 판단되면, cycle 완료 표시에 녹색 불빛이 나옵니다.

모든 단계를 완료한 후에, 항상 영상 이미지를 통해 확실히 detachment가 되었는지 확인하십시오.



LED Summary

	System Ready	Solid green 1 beep	Ready to detach
	Current Flow	Solid green No sound	Current flowing
	Cycle Complete	Solid green 3 short beeps	Detachment likely signal†
		Flashing green 1 long beep	Non-detachment likely signal†
	Low battery	Flashing yellow No sound	System battery is low (Replace device)

Detachment Tips

Check the detachment status after every completed cycle.

- The electrolytic detachment system needs a favorable electrolytic environment.
- Remember the acronym **F.A.T.:**

F


Check the Flush Line

충분한 flush solution이 지속적으로 주입되는 것이 중요합니다.

A

Align Properly

아래처럼 delivery wire marker의 proximal 끝 부분이 2-tip 마이크로카테타의 proximal marker를 살짝 지나가야 이상적인 정렬입니다.

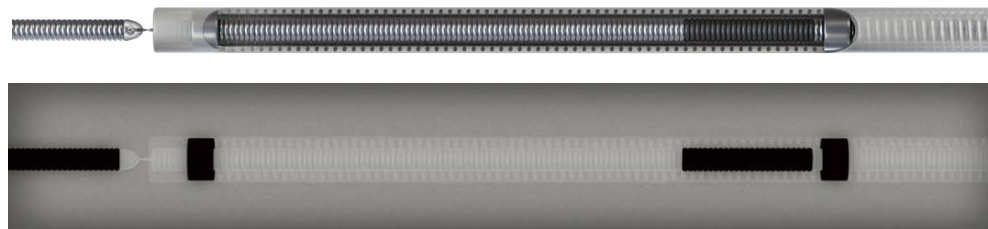

T

Thrombus Removal

지속적인 flush solution의 주입을 통해 혈전 형성 가능성을 줄여줍니다.

Product Package

New Design with a Corner Flag

New serial number starts with T
Same product number (451009-5)

SN Serial Number
T123456



한국 스트라이커 개요

스트라이커는 전 세계 100여개 이상의 국가에 정형외과, 내과, 외과, 신경외과 등 주요 의료 분야에서 혁신적인 제품과 서비스를 제공하고 있는 글로벌 의료기기 전문기업으로 1976년 한국에 진출하였습니다.

웹사이트: <http://www.stryker.com>